

bebird®

bebird Note5 を使用する

- QRコードをスキャンしてAPP StoreまたはPlayストアからアプリをダウンロードします。または、検索で「bebird」と入力し、検索してください。
- 本体の蓋を外すと電源が入ります。

電源が入ると緑色にランプが点灯します。

スマートフォンとの接続方法

アップデートにより、アプリの画面や仕様変更される場合があります。必ずアプリの案内に従って操作してください。

- スマートフォンのWiFi設定から「bebird-Note5-XXXXXX」を選択して接続します。
- アプリを開き、表示内容に従ってタップするとWiFi設定画面に切り替えます。

耳かきピンセットの使用法

本体に付いている耳かきヘッドを取り外すと、ピンセットになります。

- 接続後、スマートフォンの表示画面
- ピンセットの開閉は以下図の赤丸箇所をグリップを押し操作します。

ピンセットグリップを軽く押し離すとピンセットが開閉します。

製品仕様

162.8mm

14mm

充電口

電源ランプ
● 電源オン：緑色に点滅
● 接続完了：緑色に点灯
● 充電中：赤色に点灯
● 充電完了：赤色ランプが消灯

お手入れ方法
耳かきヘッドやピンセットを清掃する際には、ウェットティッシュ、付属のクリーニング用綿棒をご使用ください。

同梱物

- 耳かきヘッド(S) × 各2個 (シリコン素材)
- 耳かきヘッド(R) × 各2個 (シリコン素材)
- 耳かきヘッド × 4個 (シリコン素材+綿棒形状)
- 耳中チェック用カバー
- クリーニング用綿棒 × 2本
- 耳かきヘッド用収納ケース
- A to C 充電ケーブル (USB・Type-Aアダプタ別売)

耳かきヘッドの交換方法

耳かきヘッドを取り外す時は、ピンセットグリップを押し取り外してください。

ピンセットグリップを押し離すと、ピンセットが開閉します。

耳かきヘッドを取り付けるときは、ピンセットグリップを押し、ピンセットが開いた状態で取り付けください。

耳中チェック用カバーの使い方

耳かきヘッドをピンセットの先端に取り付けます。

耳かきヘッドをピンセットの先端から取り外します。

耳中チェック用カバーをピンセットに差し込みます。

耳かきヘッドを装着したままでも耳中チェックは可能です。耳の中をより見やすくしたいときは、耳中チェック用カバーを取り付けてもらえることをおすすめします。

故障/トラブルの原因や解決方法

症状	解決方法
起動時にランプが点灯せず、動作しない	本体を蓋から出し入れして、電源を再起動してください。 電源ランプが点灯しない場合、バッテリー切れの可能性があります。1時間程度充電してからお使いください。
レンズのLEDライトが点灯しない	本体の蓋を抜いた後に外して、電源を再起動してください。
アプリが起動しない	既存アプリをアンインストールし、QRコードをも一度スキャンし、インストールしてください。
耳かきヘッドがしっかり取り付けられない	耳かきヘッドやレンズにゴミ等が付着していないか確認してください。詳細は「耳かきヘッドの交換方法」をご確認ください。
電源ランプが極ランプに高速点滅し自動的に電源が切れてしまう	バッテリー残量が低下しています。1時間程度充電を行ってから再度お使いください。
本体がアプリと接続しているが、画像が正常に表示しない	①スマートフォン設定のWiFi接続を一度、オフしてから再度オンにしてください。 ②再度、「bebird-Note5-XXXXXX」に接続し、アプリを再起動してください。
WiFi接続が不安定ですぐに切れてしまう	本体の電源を入れ直してください。
上記の操作で問題が解決しない場合は、サポートセンターにご連絡ください。	

使用上の注意事項

- レンズを清掃する際には、付属のクリーニング用綿棒をご使用ください。
- 移動しながら耳かきを使用しないでください。また使用中に他人にぶつからないように、ご注意ください。
- 小さいお子様が間違えて使用しないように、手の届かない場所に保管してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まないようにご注意ください。
- 事故防止のため、お子様1人での使用をしないでください。必ず大人の方が耳かきをしてください。
- 本体は防水仕様ではないため、水につけたり、水をかけたりしないでください。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。
- 本体はリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。
- DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながら使用しないでください。また、製品を充電する充電端子が露出しており、金属片などが入らないようにご注意ください。異物が入ると発熱/発火の原因となります。
- 直射日光の当たる場所には本体を置かないでください。故障の原因となります。
- ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っているため、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速やかに中止してQRコードをカメラで読み取り、サポートセンターにご連絡をお願いいたします。
- 本製品には繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されています。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨てないでください。本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体などの規則に従って頂くか、msupport@futuremodel.co.jpまでお問合せください。

基本仕様

ブランド: bebird

製品名: スマート耳かき Note5

製品型番: 10T-BD-N5-NV(ネイビー)

製品モデル: Note5

製品サイズ: 本体 直径14×高さ162.8mm

重さ: 本体29g

WiFi: IEEE 802.11b/g/n

動作周波数: 2.4GHz

fps値: 20fps

動作温度: -10～45℃

使用電池: リチウムイオン(Li-ion)電池(DG3.7V 230mAh)

連続使用時間: 約90分

充電時間: 約60分

定格入力: DC5V/0.5A

レンズサイズ: 3.2mm

レンズの焦点距離: 13.5mm

被写界深度: 10～50mm

カメラ画素数: 1000万

ジャイロスコップ: 6軸

日本正規代理店
株式会社IoTBank
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 28F
サポートセンターはこちらへ

保証書

製品型番	
お客様のお名前	
お客様のご住所	〒
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

販売店にて記載(レシートの添付) 問い合わせ先

2022年6月23日 制定

＜無料修理規定＞

- 取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長されません。また、綿棒、耳かきやバッテリーなどの消耗品は無料修理に含まれておりません。
- 贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただく場合がございます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦当社指定の国内正規品以外での使用。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本所に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。

※本規定は、予告なく変更することがあります。

bebird®

取扱説明書兼保証書

Note5