

取扱説明書兼保証書



本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

アプリをダウンロードします



iOS: App Storeで「bebird」を検索してください
Android: Google Playで「bebird」を検索してください
またはQRコードをスキャンしてアプリをダウンロードしてください

Wi-Fiへの自動接続




Wi-Fiへの手動接続




製品仕様



付属品の取付方法

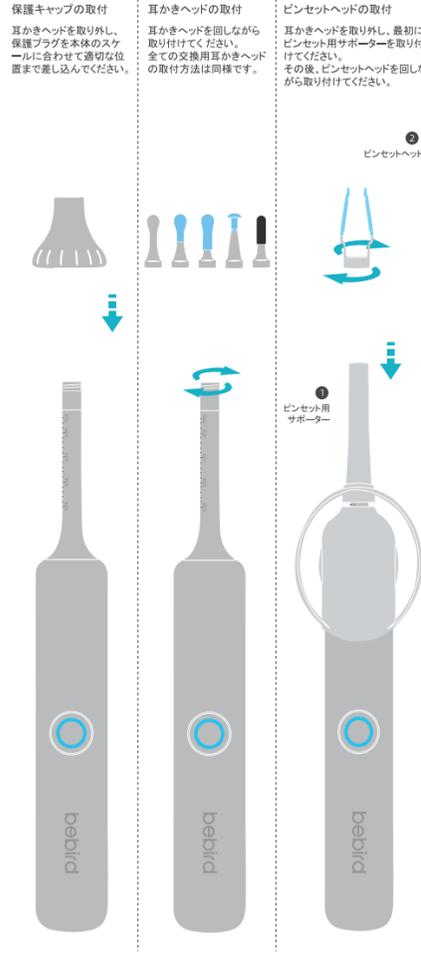


ピンセットの使用法

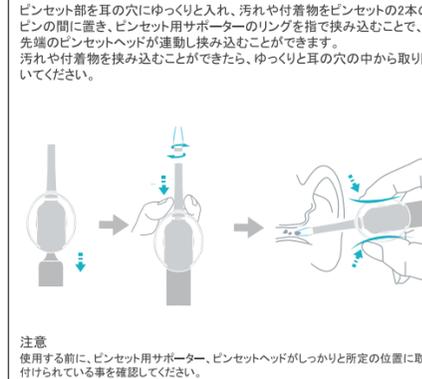


注意
使用前に、ピンセット用サポーター、ピンセットヘッドがしっかりと所定の位置に取り付けられている事を確認してください。

レンズホースの使用法

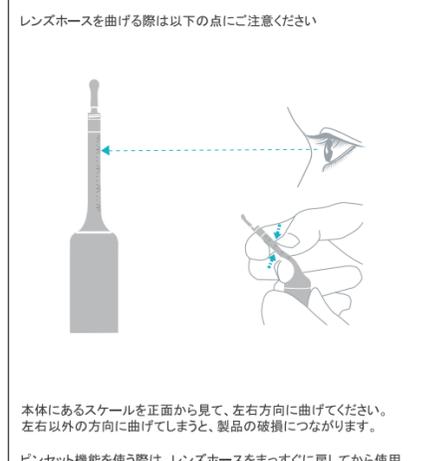

同梱物

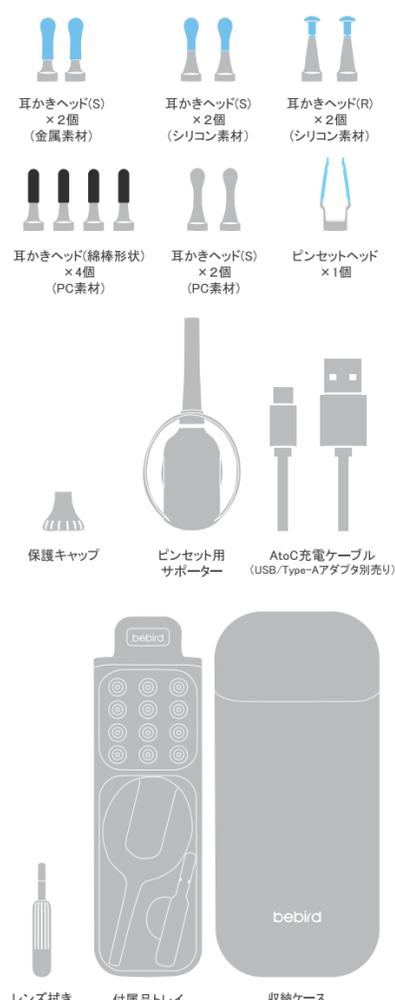

トラブルシューティング

症状	解決方法
起動時にランプが点灯せず動作しない	①電源の再起動をしてください。 ②ランプが点灯しない場合、バッテリー切れの可能性がります。充電してから再度お試しください。
レンズのLEDライトが点灯しない	接続を解除し、電源を再起動してください。
アプリが起動しない	アプリをアンインストールし、QRコードより再度インストールをしてください。
耳かきヘッドがしっかりと取り付けられない	耳かきヘッドまたは本体にゴミ等が附着していないか確認してください。 ※取付方法は「付属品の取付方法」の「耳かきヘッドの取付」を確認してください。
電源ランプが青色で点滅して電源が切れてしまう	バッテリー残量が低下しています。充電をしてから再度お使いください。
本体がアプリと接続しているが画像が正常に表示されない	①スマートフォン設定のWi-Fi接続を一度解除してから再度接続にし直してください。 ②アプリを再起動してください。
Wi-Fi接続が不安定ですぐに切れてしまう	①本体の電源を入れ直してください ②一度、Wi-Fi環境を確認し再接続してください。
映像がぼやける	本体のレンズ部分を綿棒などを用いて拭いてください。
左右の耳で映像が反転している	アプリ画面左下の左右の切り替えをしてください。

上記の操作で問題が解決しない場合は、サポートセンターまでご連絡ください。

使用上の注意事項

1. レンズを清掃する際には、綿棒や柔らかい布をご使用ください。
2. 移動しながら耳かきを使用しないでください。また、使用中に他の人にぶつからないように、ご注意ください。
3. 小さいお子様が間違えて使用しないように、手の届かない場所に保管してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まないようにご注意ください。
4. 事故防止のため、お子様1人でのご使用をしないでください。必ず大人の方が耳かきをしてください。
5. 本体は防水仕様ではないため、水につけたり、水をかけたりしないでください。
6. 本体はリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。
7. DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながらのご使用はお控えください。また、充電端子が露出しておりますので、金属片などが入らないようにご注意ください。異物が入ると発煙/発火の原因となります。
8. 直射日光の当たる場所には本体を置かないでください。故障の原因となります。
9. ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っているため、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は使用を速やかに中止し、サポートセンターまでご連絡をお願いいたします。
10. 本製品には繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されています。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨ててください。本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体などの規則に従って頂くか、msupport@futuremodel.co.jpまでお問合せください。

基本仕様

ブランド: bebird	動作温度: -10~40℃
製品名: スマート耳かき Note6	使用電池: リチウムイオン(Li-ion)電池
製品型番: IOT-BD-N6-NV(ネイビー)	DC3.7V 230mAh
製品モデル: Note6	連続使用時間: 約80分
本体サイズ: 直径15.5×高さ131mm	充電時間: 約50分
収納ケースサイズ: 幅64×高さ145×奥行25mm	定格入力: DC5V/0.5A
重さ: 本体 約18g / 収納ケース 約112g	レンズサイズ: 3.1mm
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n	レンズの焦点距離: 12.5mm
動作周波数: 2.4GHz	被写界深度: 10~50mm
fps値: 20fps	カメラの画素数: 1,000万
	ジャイロセンサー: 3軸

保証書

製品型番	
お客様の名前	
お客様のご住所	
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用で保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長されません。また、交換用の耳かきヘッドや充電ケーブル等の付属品は無料修理に含まれておりません。
 2. 贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。
 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただく場合がございます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地災、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦当社指定の国内正規品以外での使用。
 4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
 5. 本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
 6. 海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。
- ※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本所に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。
- ※本規定は、予告なく変更することがあります。



日本正規代理店
株式会社IoTBank
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 28F
サポートセンターはこちらへ