

スマート耳かき QE-1

お使いのスマートフォンによって 設定方法や設定画面が異なる場合がございます。 下記の接続方法を参考にしていただき、 お客様のスマートフォンにあった設定をお願いいたします。

App store またはGoogle play から アプリをダウンロードします。 検索で「QiPower」と入力し、検索してください。

アプリ



QiPower









スマートフォンのWiFi設定から アプリを開き、表示内容に従 スマートフォンのWIFI設力 「QiPower-XXXXXX」 を選択して接続します。

ってタップすると使用開始になります。





耳かきヘッドの交換方法



同じ耳かきヘッドを長期間使用することをおすすめしません。 材料の多化による断裂を避けるために、三ヶ月ごとまたは 傷や剥がれが発生した場合はすみやかに交換することを お勧めします。

同梱物



製品サイズ



故障/トラブルの原因や解決方法

症状	解決方法
電源ボタンを長押ししても反応しない	①再起動を試してください。 ②電源ランブが点灯しない場合、 パッテリー切れの可能性があります。 1時間程度充電してからお使いください。
レンズのLEDライトが点灯しない	①本体の電源を入れ直してください。 ②カメラの先端を確認してください。
耳かきヘッドがしっかり 取り付けられない	耳かきヘッドやレンズにゴミ等が付着していないか確認してください。詳細は「耳かきヘッドの交換方法」をご確認してください。
電源ランブが青色に 高速点減し自動的に 電源が切れてしまう	バッテリー残量が低下しています。 1時間程度充電を行ってから再度お使いください。
本体がアプリと接続しているが、 画像が正常に表示しない	①スマートフォン設定のWFi接続を一度 オフにしてから再度オンにしてください。 ②再度、「GiPower-XXXXXX」」に接続し、 アプリを再起動してください。
WiFi 接続が不安定ですぐに 切れてしまう	WiFi が切れてしまう場合、 本体の電源を入れ直してください。

基本什様

フラント: CIPPOWER 製品名: スマート耳かき QE-1 製品型番: IOT-QP-01-WH(ホワイト)、IOT-QP-01-BK(ブラック) 製品モデル: QIPOWER QE-1 製品サイズ: 本体 直径 13×高さ 130.3mm 重さ:本体 13g WiFi: IEEE802.11b/g/n 動作周波数:2.4GHz fps値:20fps fps値:/2Utps 動作温度:-10~45℃ 使用電池:リチウムイオン(Li-ion)電池(DC3.7V180mAh) 連続使用時間:約60分 連続使用時間: 約60分 充電時間: 約60分 充電時間: 約60分 た格入力: DC5V/1A レンズサイズ: 3.5mm レンズの焦点距離: 13.5mm 被写界深度: 10~50mm カメラの画素数: 300万 ミンカイロスコープ: 3軸 ジャイロスコープ:3軸

使用上の注意事項

- 1. レンズを清掃する際には、アルコールコットンなどで拭いてください。
- 2. 移動しながら耳かきを使用しないでください。また使用中に他人に ぶつからないように、ご注意ください。
- 3. 小さいお子様が間違って使用しないように、手の届かない場所に保管 してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まない ようにご注意ください。
- 事故防止のため、お子様一人でのご使用をしないでください。 必ず大人の方が耳かきをしてください。
- 5. 本体は水などで洗わないでください。
- 6. 本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない 場合は、1か月に1回は充電してください。
- 直射日光があたる場所には本体を置かないでください。 故障の原因になります。
- ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っている 為で、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速 やかに中止してサポートセンターにご連絡をお願い致します。
- 10. 本製品には、繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されて います、破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨てないでください。 本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体規則に従って頂くか、 もしくはmsupport@futuremodel.co.jpまでお問い合わせください。

日本正規代理店 株式会社IoTBank 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー 28F サポート情報はこちらへ



保証書 製品型番 お客様のお名前 = お客様のご住所 ご連絡先雷話番号 保証期間 お買い上げ日から1年間 お買い上げ日 年 月 日 販売店名

販売店にて記載(レシートの添付) 問い合わせ先



<無料修理規定>

1.取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で 保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただ きます。 製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、 サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長され ません。また、綿棒、耳かきやパッテリーなどの消耗品は無料修理に含まれて おりません。

おりません。 2.ご贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。 3.保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただ

る味証制同内とも次の場合には有料管理よるは管理を制即できていたで、 (場合がごいます。 ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。 ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。 ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。

故障及び損傷。 ⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。 ⑥保証書は声買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、 或いは字句を書き換えられた場合。 ⑦当社指定の国内正規品以外の使用。 (利野町東付票 数を11)と、ませいのエチ切り(伊徳) アイださい。

公当社有定め国内正規品以外の関用。4.保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。5.本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan) 6.海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料

※お客様にこ配入頂いた個人情報保証書控は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただ 〈場合がごいますのでご了承ください。 ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の 権利を制限するものではありませか。保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。 ※本規定は、予告な〈変更することがあります。

2022年6月23日 制定



取扱説明書兼保証書

QE-1