

スマート耳かき QE-15

スマートフォンとの接続方法

お使いのスマートフォンによって
設定方法や設定画面が異なる場合がございます。
下記の接続方法を参考に、
お客様のスマートフォンにあった設定をお願いいたします。

- 1 App storeまたはGoogle playから
アプリをダウンロードします。
検索で「QiPower」と入力し、検索してください。



- 2 アプリのダウンロード完了後、本体の蓋を外します。




- 3 スマートフォンのWiFi設定から
「QiPower-XXXXXX」
を選択して接続します。
- 4 アプリを開き、表示内容に従って
タップすると使用可能になり
ます。



- 5 状態表示ランプについて
充電時：常に赤色に点灯
満充電時：消灯
動作中：緑色に点灯


耳かきヘッドの交換方法

図のように、耳かきヘッドを取り外し、
新しい物を取り付けます。

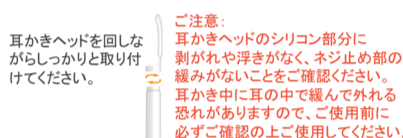


同じ耳かきヘッドを長期間使用することをおすすめしません。
材料の劣化による断裂を避けるために、三ヶ月ごとまたは
傷や割れが発生した場合はすみやかに交換すること
をお勧めします。

一体型保管ケースについて

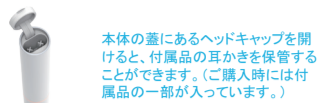

本体の蓋にあるヘッドキャップを開
けると、付属品の耳かきを保管する
ことができます。(ご購入時には付
属品の一部が入っています。)

同梱物

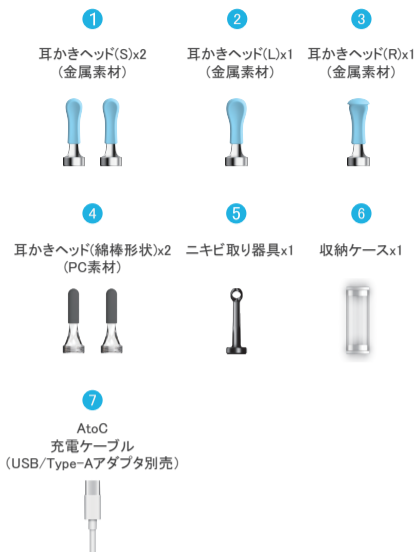

基本仕様

ブランド: QIPOWER
製品名: スマート耳かき QE-15
製品型番: IOT-QP-15-WH(ホワイト), IOT-QP-15-BK(ブラック)
製品モデル: QIPOWER QE-15
製品サイズ: 本体 直径 14 × 高さ 155mm
重さ: 本体 25g
WiFi: IEEE802.11b/g/n
動作周波数: 2.4GHz
fps値: 20fps
動作温度: -10~45℃
使用電池: リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V300mAh)
連続使用時間: 約85分
充電時間: 約85分
定格入力: DC5V/0.5A
レンズサイズ: 3.5mm
レンズの焦点距離: 13.5mm
被写界深度: 10~50mm
カメラの画素数: 500万
ジャイロセンサー: 6軸

製品サイズ



故障/トラブルの原因や解決方法

症状	解決方法
蓋を外しても反応しない	①再起動を試してください。 ②電源ランプが点灯しない場合、 バッテリー切れの可能性があります。 1時間程度充電してからお使いください。
レンズのLEDライトが 点灯しない	①本体の電源を入れ直してください。 ②カメラの先端を確認してください。
耳かきヘッドがしっかり 取り付けられない	耳かきヘッドやレンズにゴミ等が 付着していないか確認してください。 詳細は「耳かき ヘッドの交換方法」をご確認ください。
電源ランプが緑色に 高速点滅し自動的に 電源が切れてしまう	バッテリー残量が少ないです。 充電を行ってください。
WiFi に接続しているが 映像がアプリで表示されない	①スマートフォン設定のWiFi接続を一度 オフにしてから再度オンにしてください。 ②再度、「QiPower-XXXXXX」に接続し、 アプリを再起動してください。
WiFi 接続が不安定ですぐに 切れてしまう	WiFi が切れてしまう場合、 本体の電源を入れ直してください。

使用上の注意事項

1. レンズを清掃する際には、アルコールコットンなどで拭いてください。
2. 移動しながら耳かきを使用しないでください。また使用中に他人に
ぶつからないように、ご注意ください。
3. 小さいお子様が間違えて使用しないように、手の届かない場所に保管
してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まない
ようにご注意ください。
4. 事故防止のため、お一人一人でご使用をしないでください。
必ず大人の方が耳かきをしてください。
5. 本体は水などで洗わないでください。
6. 本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない
場合は、1か月に1回は充電してください。
7. DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。
充電しながら本製品を使用しないでください。
8. 直射日光がある場所には本体を置かないでください。
故障の原因になります。
9. ご使用中に本体が熱くなる場合がございます。放熱処理を行っている
ので、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速
やかに中止してサポートセンターにご連絡をお願い致します。
10. 本製品には、繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されて
います。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨ててください。
本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体規則に従って頂か、
もしくはmsupport@futuremodel.co.jpまでお問い合わせください。

日本正規代理店
株式会社IoTBank
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 28F
サポート情報はこちらへ



保証書	
製品型番	
お客様の名前	
お客様の住所	〒
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

販売店にて記載(レシートの添付)
問い合わせ先



<無料修理規定>

1. 取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で
保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。
製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、
サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長され
ません。また、綿棒、耳かきやバッテリーなどの消耗品は無料修理に含まれ
ておりません。
2. ご贈答品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただ
く場合がございます。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起
因する故障及び損傷。
④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合
の故障及び損傷。
⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。
⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、
或いは字句を書き換えられた場合。
⑦当社指定の国内正規品以外での使用。
4. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
5. 本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan)
6. 海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料
修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただ
く場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を
お約束するものではありません。保証期間経過後の修理について
ご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。
※本規定は、予告なく変更することがあります。

2022年6月23日 制定