



XLIFE X0を使用する

1

QRコードをスキャンして
アプリをダウンロードしてください。



2

電源ボタンを長押しすると
電源が入ります。



電源が入ると
青ランプが点灯
します。

スマートフォンとの接続方法

アップデートにより、アプリの画面や仕様変更される場合
があります。必ずアプリの案内に従って操作をしてください。

1

アプリを開き、表示内容に
従ってタップするとWiFi設定
画面に切り替えます。

2

スマートフォンのWiFi設定
から「XLIFE-X0-XXXXXX」
を選択して接続します。
アプリに戻ると使用開始に
なります。



耳かきヘッドは交換でき
ないので、ご使用後は
先端に負荷がかからない
ように保管してください。



ご注意：
耳かき部に傷や断裂等の
劣化がないことをご使用前
に必ずご確認の上ご使用し
てください。
劣化が見られたときは耳の
中で折れたり傷をつけてし
まう可能性がありますので
ご使用を中止してください。

同梱物

1

AttoC
充電ケーブル
(USB/Type-Aアダプタ別売)



製品サイズ



140mm

14mm

故障/トラブルの原因や解決方法

症状	解決方法
起動時にランプが点灯せず動作しない	電源ランプが点灯しない場合、バッテリー切れの可能性が有ります。1時間程度充電してからお使いください。
映像が映らない	一度本体の電源ボタンを長押ししてオフにし、再度電源をオンしてください。
アプリが起動しない	既存アプリをアンインストールし、QRコードをもう一度スキャンし、インストールしてください。
電源ランプが青色に高速点滅し自動的に電源が切れてしまう	バッテリー残量が低下しています。1時間程度充電を行ってから再度お使いください。
本体がアプリと接続しているが、リアルタイムの映像が正常に表示されない	①スマートフォン設定のWiFi接続を一度オフにしてから再度オンにしてください。 ②再度、「XLIFE-X0-XXXXXX」に接続し、アプリを再起動してください。
WiFi接続が不安定で映像が途切れてしまう	本体の電源を入れ直し、アプリで再度接続してください。

上記の操作で問題が解決しない場合は
サポートセンターにご連絡ください。

日本正規代理店
株式会社IoTBank
東京都新宿区北新宿2-21-1
新宿フロントタワー 28F
サポート情報はこちらへ



基本仕様

ブランド: XLIFE
製品名: スマート耳かき X0
製品型番: IOT-XF-X0-WH (ホワイト)、
IOT-XF-X0-BK (ブラック)
製品モデル: X0
製品サイズ: 本体 直径 14 × 高さ 140mm
重さ: 本体 11g
WiFi: IEEE802.11b/g/n
動作周波数: 2.4GHz
fps値: 20fps
動作温度: -10 ~ 45°C
使用電池: リチウムイオン(Li-ion)電池(DC3.7V 130mAh)
連続使用時間: 約35分
充電時間: 約35分
定格入力: DC5V/0.5A
レンズサイズ: 3.5mm
レンズの焦点距離: 13.5mm
被写界深度: 10 ~ 50mm
カメラの画素数: 300万
ジャイロスコップ: 3軸

使用上の注意事項

- レンズを清掃する際には、アルコールコットンなどで拭いてください。
- 移動しながら耳かきを使用しないでください。また使用中に他人にぶつからないように、ご注意ください。
- 小さいお子様が間違えて使用しないように、手の届かない場所に保管してください。また、小さな部品も含まれているので、飲み込まないようにご注意ください。
- 事故防止のため、お子様一人でのご使用をしないでください。必ず大人の方が耳かきをしてください。
- 本体は水などで洗わないでください。
- 本体にはリチウムイオン電池が内蔵されています。長時間使用しない場合は、1か月に1回は充電してください。
- DC5Vの充電器を使用して本体を充電してください。充電しながら本製品を使用しないでください。
- 直射日光があたる場所には本体を置かないでください。故障の原因になります。
- ご使用中に本体が熱くなることがございます。放熱処理を行っているため、不良品ではありません。ただし、高温が続く場合は、使用を速やかに中止してサポートセンターにご連絡をお願い致します。
- 本製品には、繰り返し充電可能なリチウムイオン電池が内蔵されています。破棄する場合は、家庭用ごみと一緒に捨ててください。本製品を破棄する場合は、お住まいの自治体規則に従って頂くか、もしくはmsupport@futuremodel.co.jpまでお問い合わせください。

保証書

製品型番	
お客様のお名前	
お客様のご住所	〒
ご連絡先電話番号	
保証期間	お買い上げ日から1年間
お買い上げ日	年 月 日
販売店名	

販売店にて記載(レシートの添付)
問い合わせ先



<無料修理規定>

- 取扱い説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、1製品につき1回無料修理をさせていただきます。製品に添付されている保証書ならびに購入記録等を添えて、サポートセンターまでご連絡ください。修理交換後に、保証期間は延長されません。また、綿棒、耳かきやバッテリーなどの消耗品は無料修理に含まれておりません。
- ご購入商品の修理に関するご相談は、サポートセンターまでご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理または修理をお断りさせていただきます。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧に起因する故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤保証書と購入記録等の提示がない場合。
 - ⑥保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或いは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦当社指定の国内正規品以外のご使用。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 本規定及び保証書類は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan)
- 海外からの着払い、海外への修理品の発送はいたしません。

※お客様にご記入頂いた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動などのために利用させていただきます。ご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、サポートセンターにお問合せください。
※本規定は、予告なく変更することがあります。

2022年6月23日 制定



取扱説明書兼保証書

X0